



Tandenbleekstrips

Gebruiksaanwijzing

Waarschuwing:

1. Niet geschikt voor kinderen jonger dan 16 jaar.
2. Slik de strip niet in.
3. Vermijd contact van de strips met de ogen of de huid.
4. Als de strip in aanraking komt met de huid, kan dit tijdelijke huidirritatie veroorzaken.
5. Stop met het gebruik en raadpleeg onmiddellijk een tandarts bij eender welk ongemak.
6. Niet geschikt voor personen met afters, blootliggend tandvlees of na een mondheilkundige ingreep.

Gebruiksaanwijzing:

1. Haal de strips van de drager.
2. Breng de bovenste strip aan op de bovenste tanden en herhaal dit voor de onderste tanden.
3. Laat 30 minuten zitten; vermijd eten of drinken tijdens het gebruik.
4. Verwijder en gooi de strips weg, spoel eventuele achtergebleven gel af en bewonder het resultaat.

Houdbaarheid:

2 jaar

Bewaring:

Bewaren op een droge en koele plaats (buiten het bereik van jonge kinderen houden).

Verwijdering:

Gooi het product na gebruik weg volgens de plaatselijke afvalvoorschriften.

Belangrijke tips:

1. Gebruik de tandenbleekstrips regelmatig, om de drie maanden, voor een wittere en stralende glimlach.
2. Beperk of vermijd roken, en het drinken van koffie, thee, cola of rode wijn, evenals het eten van sterk kleurende voedingsmiddelen zoals kersen en bosbessen, om een beter en langduriger resultaat te verkrijgen.
3. Gebruik alle strips binnen twee weken voor het beste resultaat.

Gebruikersgids:

1. Vermijd het gebruik van de strips onmiddellijk na het poetsen van je tanden. Wacht minstens één uur na het poetsen voor je de strips aanbrengt.
2. Gebruik de strips niet opnieuw; gooi ze na één gebruik weg.
3. De ingrediënten van de strips zijn veilig; als er wat gel wordt doorgeslikt, is dat volledig onschadelijk.
4. Verwijder eventuele resten van gel door je tanden te poetsen en te spoelen.