

Kit de blanchiment des dents

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

Notre blanchisseur Easy Smile utilise une technologie innovante de lumière LED bleue. Les rayons bleus réagissent avec le gel blanchissant et éliminent efficacement les taches à la surface des dents. L'embout buccal a été conçu sur la base d'études techniques et est rendu aussi doux que possible.

Le kit Easy Smile est confortable à utiliser et ne provoque aucune gêne pendant le blanchiment. Lorsque vous mordez dans l'embout buccal, il s'adapte parfaitement et couvre toutes vos dents.

Avant de commencer le traitement, il est important de comprendre son fonctionnement et de suivre les étapes correctement. Veuillez lire attentivement les instructions avant utilisation.

APPLICATIONS

Le blanchisseur est idéal pour éliminer :

les taches de café, les taches de tabac, les décolorations génétiques, les taches dues à la tétracycline, les colorants alimentaires, les taches liées à l'âge et autres causes de décoloration.

CONSERVATION

Ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Conserver dans un endroit frais.

MODE D'EMPLOI

Rincez soigneusement l'embout buccal et la bouche avant utilisation.

Placez-vous devant un miroir et comparez vos dents à l'échelle de teintes pour déterminer la couleur de départ.

Tournez le stylo de gel blanchissant jusqu'à ce que le gel atteigne la brosse. Appliquez une fine couche de gel uniformément sur toutes les dents, en haut et en bas. N'utilisez pas trop de gel (0,5 ml – 0,7 ml par application). Une plus grande quantité n'apporte pas un meilleur ou plus rapide résultat.

Évitez le contact du gel avec les gencives ou l'intérieur des lèvres. Si le gel touche accidentellement les gencives, pas de panique : la sensation de picotement disparaît en quelques minutes.

Rincez ensuite avec de l'eau.

Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé avant la première utilisation. Placez l'embout buccal dans la bouche, mordez-le et maintenez le bouton enfoncé pour activer la lumière LED. Respirez profondément pour réduire la production de salive (l'excès de salive dilue le gel).

L'appareil s'éteint automatiquement après 16 minutes. Retirez l'embout buccal, rincez-le ainsi que la bouche à l'eau, puis comparez à nouveau la teinte de vos dents avec l'échelle de couleur.

Ne mangez ni ne buvez rien (sauf de l'eau) pendant les 30 minutes suivant le traitement.

INSTRUCTIONS VISUELLES (illustrations) :



Rincez la bouche avant utilisation



Appliquez le gel sur toutes les dents à l'aide du stylo



Insérez l'embout, mordez-le et activez la lumière LED



Attendez 16 minutes pour terminer le traitement



Rincez la bouche avec de l'eau



Nettoyez l'embout buccal et refermez le stylo avec le capuchon

RAPPELS

1. Rincez bien la bouche, séchez complètement les dents et appliquez le gel de manière uniforme.
2. L'excès de salive peut réduire l'efficacité du gel.
3. Chaque personne a une sensibilité dentaire différente. Une légère sensibilité est normale. En cas d'inconfort, vous pouvez utiliser un gel désensibilisant.
4. En cas de forte sensibilité, réduisez la durée d'utilisation ou arrêtez immédiatement le traitement.
5. N'appliquez pas le gel directement sur les gencives ou l'intérieur des lèvres.
6. Si le gel entre en contact avec la peau ou les vêtements, rincez immédiatement.
7. Refermez toujours le stylo avec son capuchon après utilisation pour éviter l'évaporation des ingrédients actifs.
8. Garder hors de portée des enfants.
9. N'utilisez pas le blanchisseur plus de 4 fois par semaine.

INGRÉDIENTS

Sorbitol, Eau, Acide phtalimidopéroxypropionique (PAP), Propylène glycol, Glycérine, Nitrate de potassium, PEG-8, Hydroxyapatite, Gomme de cellulose, Hydroxyéthylcellulose, Gomme xanthane, Saccharine sodique, Menthol, Méthylparabène, Extrait de feuille d'Aloe Barbadosis (Aloe Vera), Extrait de camomille, Extrait de grenade, Bicarbonate de sodium, Propylparabène.

REMARQUES

- Le temps de charge est d'environ 2 heures.
- Indicateur de charge : l'embout Easy Smile clignote pendant la charge.
- Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre l'appareil.
- La durée de vie du blanchisseur est d'environ 24 mois.