



Strisce sbiancanti per denti

ISTRUZIONI PER L'USO

Avvertenze:

1. Non adatto ai bambini di età inferiore ai 16 anni.
2. Non ingerire la striscia.
3. Evitare il contatto delle strisce con gli occhi o la pelle.
4. Se la striscia entra in contatto con la pelle, può causare un'irritazione temporanea.
5. Interrompere l'uso e consultare immediatamente un dentista in caso di qualsiasi fastidio.
6. Non adatto a persone con ulcere, gengive scoperte o dopo un intervento chirurgico orale.

Istruzioni per l'uso:

1. Rimuovere le strisce dal supporto.
2. Applicare la striscia superiore sui denti superiori, poi ripetere con la striscia inferiore sui denti inferiori.
3. Lasciare in posa per 30 minuti; evitare di mangiare o bere durante l'uso.
4. Rimuovere e gettare le strisce, sciacquare eventuali residui di gel e ammirare il risultato.

Scadenza:

2 anni

Conservazione:

Conservare in un luogo fresco e asciutto (tenere fuori dalla portata dei bambini piccoli).

Smaltimento:

Gettare il prodotto dopo l'uso in conformità con le normative locali.

Consigli importanti:

1. Usare regolarmente le strisce sbiancanti, ogni tre mesi, per un sorriso più bianco e luminoso.
2. Ridurre o evitare il fumo e il consumo di caffè, tè, cola o vino rosso, così come di alimenti fortemente coloranti come ciliegie e mirtilli, per ottenere un effetto migliore e più duraturo.
3. Utilizzare tutte le strisce entro due settimane per ottenere il miglior risultato.

Guida per l'utente:

1. Evitare di usare le strisce subito dopo aver lavato i denti. Attendere almeno un'ora dopo la pulizia prima di applicare le strisce.
2. Non riutilizzare le strisce; gettarle dopo un solo utilizzo.
3. Gli ingredienti delle strisce sono sicuri; se una piccola quantità di gel viene ingerita, non è dannosa.
4. Rimuovere eventuali residui di gel lavando e risciacquando i denti.