



Paski wybielające zęby

INSTRUKCJA UŻYCIA

Ostrzeżenie:

1. Nieprzeznaczone dla dzieci poniżej 16. roku życia.
2. Nie połykać paska.
3. Unikać kontaktu pasków z oczami lub skórą.
4. W przypadku kontaktu paska ze skórą może wystąpić tymczasowe podrażnienie.
5. W przypadku jakiegokolwiek dyskomfortu przerwać stosowanie i natychmiast skonsultować się z dentystą.
6. Nieodpowiednie dla osób z owrzodzeniami, odsłoniętymi dziąsłami lub po zabiegach chirurgicznych w jamie ustnej.

Instrukcja użycia:

1. Zdejmij paski z podkładu.
2. Nałóż górny pasek na górne zęby, a następnie powtórz to samo z dolnym paskiem na dolne zęby.
3. Pozostaw na 30 minut; w tym czasie nie jedz ani nie pij.
4. Usuń paski i wyrzuć je, spłucz ewentualny pozostały żel i podziwiał efekt.

Termin ważności:

2 lata

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu (trzymać poza zasięgiem małych dzieci).

Utylizacja:

Wyrzucić produkt po użyciu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.

Ważne wskazówki:

1. Używaj pastek wybielających regularnie, co trzy miesiące, aby uzyskać bielszy i bardziej promienny uśmiech.
2. Ogranicz lub unikaj palenia papierosów oraz picia kawy, herbaty, coli i czerwonego wina, a także spożywania silnie barwiących produktów, takich jak wiśnie i jagody, aby uzyskać lepszy i trwalszy efekt.
3. Zużyj wszystkie paski w ciągu dwóch tygodni, aby osiągnąć najlepszy rezultat.

Przewodnik użytkownika:

1. Unikaj używania pastek bezpośrednio po szczotkowaniu zębów. Odczekaj co najmniej godzinę po szczotkowaniu przed zastosowaniem pastek.
2. Nie używaj pastek ponownie; wyrzuć je po jednorazowym użyciu.
3. Składniki pastek są bezpieczne; jeśli niewielka ilość żelu zostanie połknięta, nie stanowi to zagrożenia.
4. Usuń resztki żelu, szczotkując i płuczac zęby.